

APARELHO DE HERBST IV



Instalação passo-a-passo



Herbst IV é um propulsor mandibular para tratamento de Classe II.

Diferenciais:


- Permite movimento de lateralidade graças às cabeças esféricas (no lugar de parafusos)
- Excelente conforto ao paciente
- Fixado com arruelas-trava (clipes)
- Para soldagem em bandas ou splints



Apresentação:

607-115-00 Aparelho de Herbst IV, Conjunto Completo

Conteúdo do conjunto:

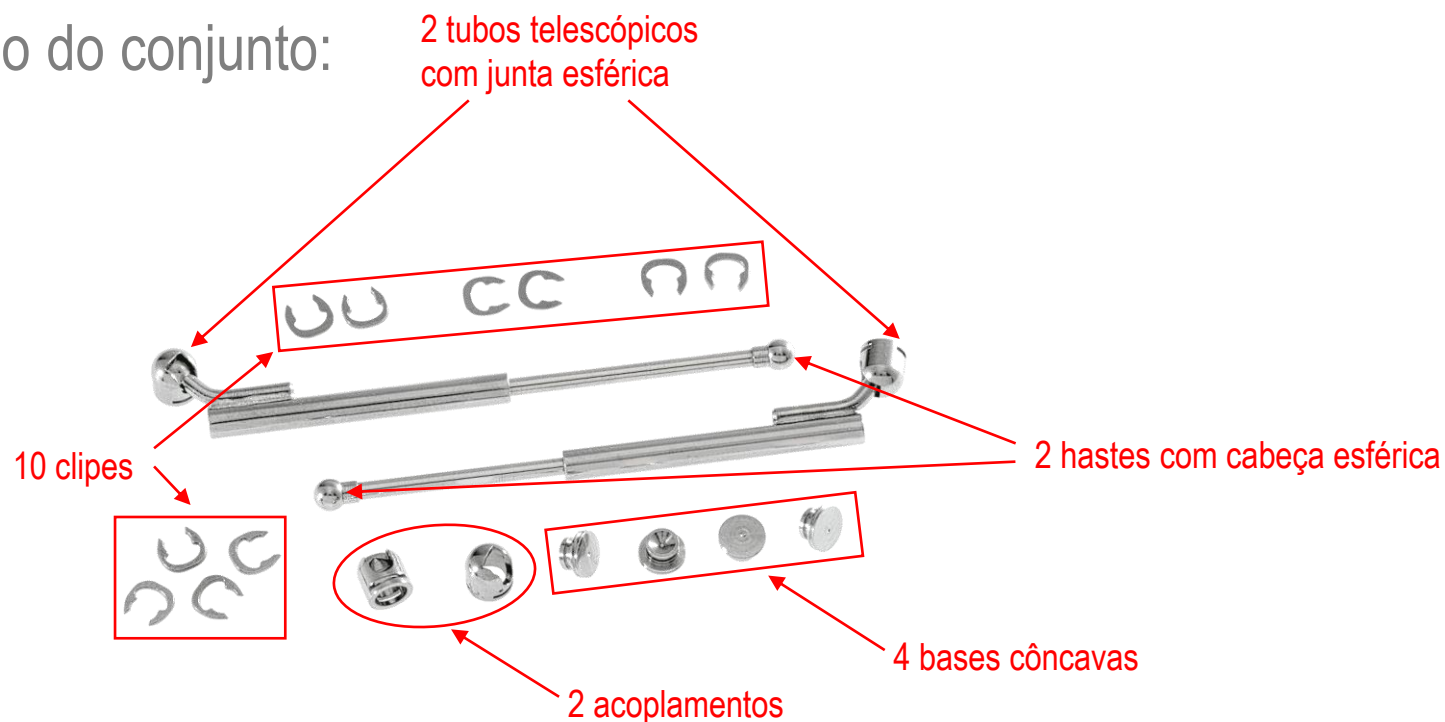

Instalação:

1. Solde as bases côncavas nas bandas (com solda prata ou solda laser)



2. Após a instalação das bandas, posicione a junta esférica do tubo telescópico na base côncava superior.

Note que a junta esférica possui dois recortes: um deve ficar voltado para a face mesial e o outro para a face distal.
(O recorte distal está oculto na foto maior.)



Para poder agarrar melhor o clipe em forma de C, →
recomendamos usar os alicates:



Weingart (REF 003-120-00)

ou

How (REF 003-111-00).




3. E então insira o clipe com um alicate para prender a junta esférica à base.

Atenção! Um braço do clipe deve ser inserido no recorte mesial e o outro braço no recorte distal da junta esférica.



Note que esta parte superior do clipe fica externa.

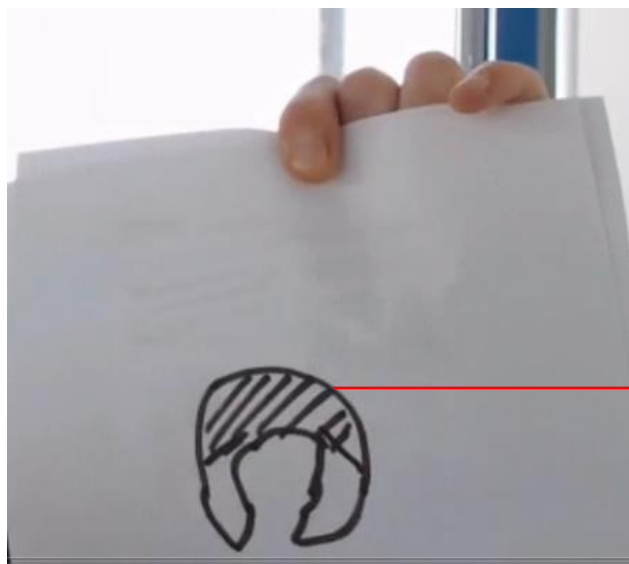


ATENÇÃO: É absolutamente necessário prestar atenção ao introduzir o clipe empurrando paralelamente à ranhura do acoplamento esférico. Se o clipe entrar obliquamente, pode deformar-se e desprender-se na boca. Se o clipe for montado e desmontado repetidas vezes, pode perder sua elasticidade original e terá que ser trocado. (reposição de clipe com 10 un. - REF 607-116-00).

5. Insira a haste no tubo telescópico.



6. Posicione a cabeça esférica da haste na base côncava inferior, cubra com o acoplamento e prenda-os com o clipe.

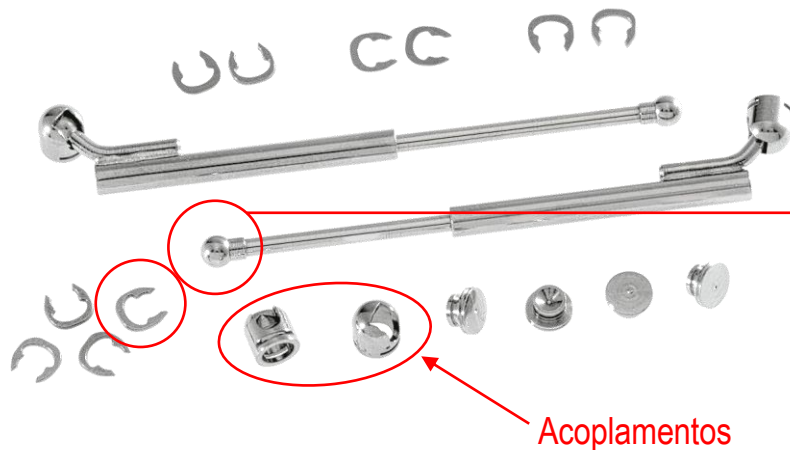

Pronto, o **Herbst IV** está instalado!
Recomendamos agendar o retorno uma semana após a instalação!

Caso precise de reposições, peça pelo código:

607-116-00	Clipes p/ Herbst IV, 10 un.	
607-125-00	Tubo telescópico com junta esférica, 1 un.	
607-128-00	Haste telescópica com cabeça esférica, 1 un.	
607-118-00	Base côncava, 10 un.	
607-103-00	Anel espaçador de 1 mm, 10 un.	
607-104-00	Anel espaçador de 2 mm, 10 un.	
607-105-00	Anel espaçador de 3 mm, 10 un.	
607-107-00	Anel espaçador de 4 mm, 10 un.	
607-112-00	Anel espaçador de 5 mm, 10 un.	

Agradecemos pela atenção e
desejamos sucesso em seus tratamentos!

Este produto é importado e distribuído pela **Nova Lianka/ Klaridental**.

Av. Marquês de São Vicente, 446, cj 211, Barra Funda, São Paulo, SP



: [\(11\) 95552-5592](tel:(11)95552-5592) - Tel.: [\(11\) 5044-5977](tel:(11)5044-5977)

Loja virtual: www.klaridental.com.br

E-mail: contato@lianka.com.br

Website: www.novalianka.com.br